

Dosering Sekusept Vloeibaar

Concentratie											
Oplossing	0,25%	0,3%	0,5%	0,75%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	3,0%	4,0%	5,0%
1 liter	2,5 ml	3 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	40 ml	50 ml
2 liter	5 ml	6 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	80 ml	100 ml
2,5 liter	6,25 ml	7,5 ml	12,5 ml	18,75 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	62,5 ml	75 ml	100 ml	125 ml
3 liter	7,5 ml	9 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml	120 ml	150 ml
4 liter	10 ml	12 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	160 ml	200 ml
5 liter	12,5 ml	15 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	200 ml	250 ml

Gebruiksaanwijzing

Desinfectieoplossing aanmaken door te verdunnen met water. Leg de instrumenten in de Sekusept oplossing. Zorg voor volledige onderdompeling. Neem de instrumenten na voorgeschreven inwerktijd* uit de oplossing en spoel deze af met water van drinkkwaliteit. Nog beter is gedestilleerd of gedemineraliseerd water.

Let op! Niet geschikt voor instrumenten waarbij onderdelen gemaakt zijn van siliconen.

* Concentratie %	Inwerktijd
4 %	15 min.
2,5 %	30 min.
1,5 %	60 min.