

Veiligheidsinformatie

- **Zorg voordat u met testen begint dat alle benodigde materialen gereed zijn voor gebruik.** Dit zijn uw CONTOUR[®]TS-meter, de CONTOUR[®]TS-teststrips, het MICROLET[®]2-prikapparaat en de MICROLET[®]-lancetten. U hebt ook CONTOUR[®]TS-controle vloeistof nodig om een kwaliteitscontrole uit te voeren. CONTOUR TS-controle vloeistoffen worden afzonderlijk verkocht.
- **⚠ Het MICROLET 2-prikapparaat is bedoeld voor zelftests door één patiënt. Vanwege het infectiegevaar mag het niet bij meer dan één persoon worden gebruikt.**
- **⊗ Gebruik bij elke test een nieuw MICROLET-lancet, omdat het na gebruik niet langer steriel is.**
- Voer geen bloedglucosetest uit als de CONTOUR TS-meter is aangesloten op een extern apparaat, zoals een computer.
- Gebruik alleen apparatuur die is goedgekeurd door de fabrikant of een erkende instantie, zoals UL of TÜV.
- Onderzoek het product op ontbrekende, beschadigde of defecte onderdelen. Als de flacon met teststrips open is in een nieuwe doos strips, mogen deze strips niet meer worden gebruikt. Neem contact op met Bayer Diabetes Care klantenservice op 0800 235 22937 voor vervangingsonderdelen.



- **Alle onderdelen van het startpakket worden beschouwd als biologisch gevaarlijk en kunnen infectieziekten overdragen, ook nadat u ze gereinigt hebt. Zie pagina 13.**
- **Was uw handen altijd goed met zeep en water en droog uw handen vóór en na het testen, het hanteren van de meter, het prikapparaat of de teststrips.**

De volgende stappen worden in de juiste volgorde getoond voor het uitvoeren van een bloedglucosetest, pagina's 7 – 12.

Vorbereiden van de teststrip



1. Was en droog uw handen goed af voor het testen.
2. Haal een CONTOUR[®]TS-teststrip uit de flacon.
3. Houd de teststrip vast met het grijze uiteinde naar boven.
4. Steek het grijze uiteinde in de teststrippoot van de meter.



De meter gaat aan. Een afbeelding van een teststrip met een knipperende bloeddruppel  wordt zichtbaar om u te laten weten dat de meter klaar is voor de test.

Gereedmaken van het prikapparaat

1. Verwijder de punctiedop van het MICROLET[®]2-prikapparaat met uw duim op de greepuitsparing zoals weergegeven.
2. Maak het ronde bescherm-dopje van het lancet los door het een kwartslag te draaien, maar verwijder het niet. Gebruik altijd MICROLET[®]-lancetten voor de beste werking.

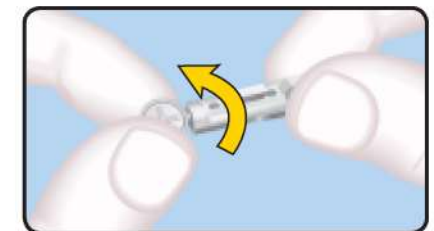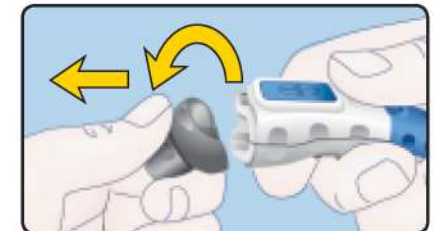

3. Steek het lancet stevig in het prikapparaat totdat het niet verder kan. Hierdoor wordt het apparaat aangespannen. U kunt ook de spanhendel uittrekken en weer loslaten.



4. Draai het ronde beschermdopje van het lancet. Bewaar dit dopje om te gebruiken bij het weggooien van het gebruikte lancet.



5. Plaats de grijze punctiedop terug voordat u een bloeddruppel verkrijgt.



6. De diepte van de prik hangt af van de instelling van de punctiedop en de hoeveelheid druk die op de prikplaats wordt uitgeoefend. U zult ontdekken welke combinatie het beste voor u werkt.




Verkrijgen van de bloeddruppel en testen


1. Druk de punctiedop stevig tegen de prikplaats en duw met uw duim op de blauwe vrijgaveknop.



2. Strijk met uw hand en vinger naar de prikplaats toe zodat er een druppel bloed wordt gevormd. Knijp niet in het gebied rond de prikplaats.

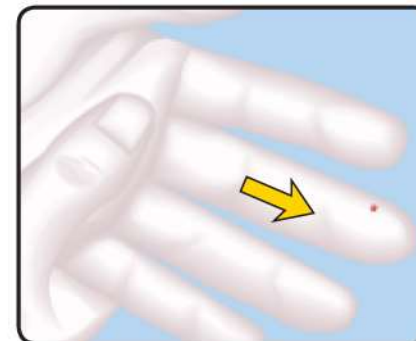

3. Test onmiddellijk nadat er een goede bloeddruppel is gevormd.

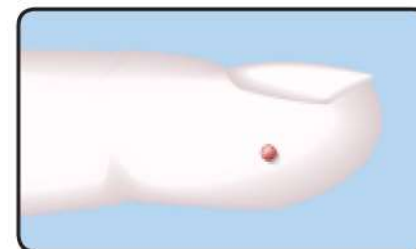

Aanbevolen druppelgrootte