


Een sneltest om op veilige wijze diep-veneuze trombose in de eerstelijnszorg uit te sluiten

### Hoe voert u een test uit met een vingerprikmonster?



- Prik de vinger van de patiënt met een geschikt lancet (diepte ongeveer 1,8 mm).

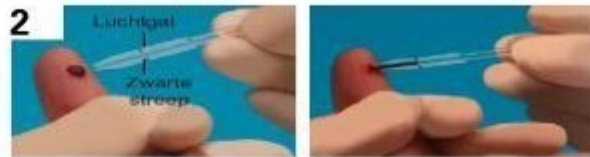

- Houd een capillairpipet horizontaal vast en raak met de tip de bloeddruppel aan op de vinger van de patiënt.
- Knijp het ballonnetje van de pipet tijdens de monsterafname niet in en zorg dat de pipetopening niet wordt afgesloten. Door capillaire werking wordt het bloed automatisch door de pipet opgezogen.
- Laat de pipet zich vullen tot aan de zwarte streep.



- Houd de capillairpipet met het bloedmonster in een verticale stand boven de ronde monsteropening van de teststrip. Knijp in het ballonnetje en breng **al het bloed** in de capillairpipet over naar de ronde monsteropening
- Opmerking: als het bloed niet uit de capillairpipet komt, plaatst u uw vinger op het luchtgat en knijpt u nogmaals in het ballonnetje.




- Laat het monster volledig door het aanwezige membraan in de ronde monsteropening absorberen voordat u buffer toevoegt.
- Houd het flesje **verticaal** en voeg **2 druppels** buffer toe aan de ronde monsteropening.
- Laat de teststrip horizontaal liggen en lees het resultaat af na **10 minuten**.

### Het resultaat aflezen



**Positief resultaat:**  
Er moet een paarse/roze streep in de testzone (T) **plus** een paarse/roze streep in de procedurele controlezone (PC) te zien zijn.

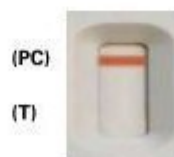

**Negatief resultaat:**  
Er is geen streep te zien in de testzone (T) **en** een paarse/roze streep in de procedurele controlezone (PC).



**Ongeldig resultaat:**  
Als er geen streep in de PC-zone verschijnt, is het resultaat ongeldig.