

# Multimed Otosillo Professional

Leest u dit A.U.B. aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken !!!

De disposable tips.

Vergeleken met desinfecteren zijn disposable tips goedkoper, hygiënischer en veiliger met betrekking tot infectie preventie.

## Hoe te bevestigen



Zorg dat u bij het bevestigen van het opzetstukje altijd het zwarte gebogen stukje vasthoudt. Het opzetstuk en de gekleurde ring moeten draaibaar zijn. Mocht het opzetstuk niet goed draaien verwijder het dan en smeer de witte ring in met Vaseline.

Dit helpt ook bij lichte lekkage 's , en tegen druppelen bij het opzet stukje.



Bevestig de disposable tip, de houder sluit automatisch.



Schuif het spatscherm over de disposable tip tot aan de witte ring. Mocht dit niet soepel gaan, smeer dan de disposable tip in met Vaseline. Werk nooit zonder spatscherm!

### Hoe te verwijderen



Druk de witte ring naar achteren. En verwijder de het spatscherm samen met de disposable tip. Gooi de disposable tip weg en maak het opzetstuk schoon met warm water.

Alle delen wat u op of in elkaar schuift ,licht insmeren met vaseline , ook de onderzijde

Van het waterbakje ( rubberen zwarte ringetje ) licht insmeren .

Dit voor komt ook water lekkage ,

Wees voorzichtig met wisselen van de tipjes, en stoot nergens tegen aan .

**Laat het handvat nooit vallen , het bovenstukje zal dan afbreken , en / of het opzet stukje zal gaan lekken, scheuren of zelfs afbreken en dit valt helaas niet onder de garantie !!**

**Heeft u nog vragen hier over neemt u dan contact met ons op**

**Merkala Alkmaar 072-20 20 057 [info@merkala.nl](mailto:info@merkala.nl)**