



Lancethouder met 6 lancetten



Cassette met 50 testen op een tape



Afstandhouders

## Bloedglucose meten



Was je handen met warm water en zeep voordat je begint. Spoel je handen af en droog ze goed af met een schone handdoek.



Gebruik altijd een kleine en goed gevormde bloeddruppel. Smeer de bloeddruppel niet uit.



Positioneer de meter zodanig dat je het testveld kan zien wanneer je bloed aanbrengt. Plaats je vinger voorzichtig tegen de afstandshouders zodat alleen de bloeddruppel in contact komt met het midden van het testveld. Hou je vinger zo stil mogelijk.



Breng de bloeddruppel onmiddellijk aan. Haal je vinger weg zodra het bericht 'meting loopt' weergegeven wordt op het scherm en je een geluidsignaal hoort (indien ingesteld).

# Accu-Chek® Mobile

Stripvrij, simpel, slim

## Metten in vier simpele stappen



1. Open het afdekkapje. De meter gaat aan.



2. Druk de prikpen stevig tegen de zijkant van je vingertop. Druk op de prikknop.



3. Breng de bloeddruppel aan in het midden van het testveld.



4. In ongeveer 5 seconden verschijnt het resultaat. Sluit het afdekkapje volledig. De meter gaat uit.


## Vervangen van de testcassette – na 50 testen




1. Open het afdekkapje. Schuif dit helemaal naar links tot de meter aan gaat.



2. Schuif de knop aan de zijkant naar boven om het cassette compartiment te openen.

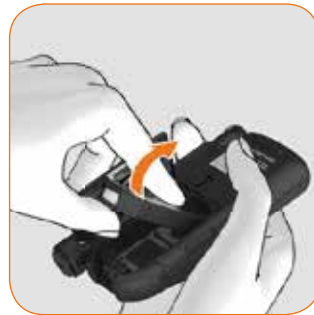

3. Verwijder de gebruikte cassette uit de meter.

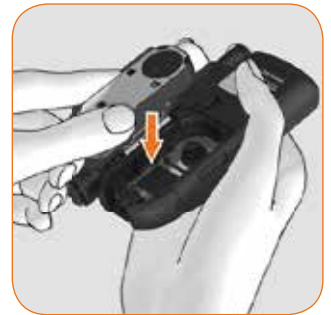

4. Plaats de nieuwe cassette in de meter. Sluit het cassette compartiment en schuif het afdekkapje terug.

## Vervangen van de lancethouder – na gebruik van 6 lancetten:



1. Haal het dopje van de prikpen. Verwijder de gebruikte lancethouder. De gebruikte lancethouder is voorzien van een rode streep en kan niet opnieuw gebruikt worden.



2. Plaats een nieuwe lancethouder. Klik het dopje terug op de prikpen.



3. Draai de instelling voor de juiste prikdiepte. Begin met een gemiddelde prikdiepte, bijvoorbeeld 3.



4. Zorg dat je prikpen klaar is voor gebruik. Beweeg het hendeltje heen ① en weer ② voor een nieuw lancet.